

Amplificateurs de boucle magnétique portables


LA-90 & LA-90 Set




Là où la parole est décisive, le « LA-90 » supprime les barrières acoustiques.

Transmission inductive aux prothèses, aux systèmes d'implant cochléaire et aux récepteurs de boucle magnétique

HUMANTECHNIK –
SMS Audio Electronique
vos partenaires pour les
accessoires audiolgiques

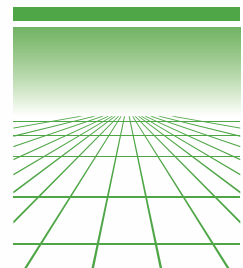

SMS
SMS Audio Electronique

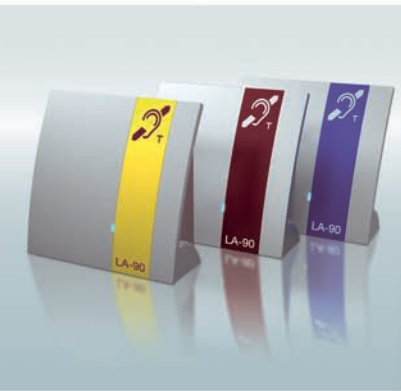

Le « LA-90 » permet de raccorder un microphone externe en complément du microphone interne. D'où une plus grande liberté de mouvement entre l'orateur et l'auditeur.



Ecoute inductive par prothèse ou récepteur de boucle magnétique.

Amplificateur de boucle magnétique portable pour une communication sans obstacle.

Le système de boucle magnétique mobile et compact « LA-90 » fait participer les personnes présentant une déficience auditive aux événements – avec la transmission des paroles directement aux prothèses ou à un récepteur de boucle magnétique, par exemple le LPU-1.

Sans travaux d'installation, le « LA-90 » est aussitôt actif : à la réception, au guichet ou dans les espaces de vente, en un mot partout où la parole est décisive.

Pour capter le son, le « LA-90 » dispose aussi bien d'un microphone intégré que d'une prise pour un microphone externe. Les informations acoustiques sont transformées en

signaux inductifs puis restituées au récepteur de boucle d'induction dans la prothèse.

Des prothèses avec bobine téléphonique sur la position «T» ou «MT» ou un récepteur spécial de boucle magnétique reçoivent ces signaux inductifs. Le « LA-90 » dispose en plus d'une possibilité de raccord pour un casque audio.

« LA-90 Set », un système complet pour une utilisation professionnelle.

Le « LA-90 Set » comprend le « LA-90 », un microphone de table, un combiné et un insert de montage pour le combiné.

Idéal dans toutes les situations où la discrétion et la confidentialité sont requises. Grâce au combiné, les personnes non appareillées ou malentendantes peuvent également profiter de la cette fonction.



Le récepteur de boucle magnétique LPU-1, réf. A-4276-0 (station de charge, réf. A-4977-0), offre une réception claire directement à l'oreille pour les personnes présentant une déficience auditive et qui ne portent pas de prothèses.



« LA-90 Set » réf. A-4211-0



Le «LA-90 SET» : Grâce au combiné, les personnes ayant une perte auditive légère peuvent également bénéficier d'un accueil discret.

LA-90 : Caractéristiques techniques		
Référence LA-90	A-4209-0	2 inserts interchangeables inclus
Référence LA-90 SET	A-4211-0	microphone de table, combiné, insert de montage et cordon de raccordement inclus
Portée hertzienne :	1 m	
Dimensions :	H: 200 x B: 185 x T: 70	
Poids :	635 g accu inclus	
Sensibilité du microphone :	jusqu'à 60 dB ±3 dB	
Alimentation électrique :	Bloc-secteur 100-240V 50-60 Hz ou alimenté par accu intégré 12 V 1300 mAh	
Cordon secteur :	1,8 m	
Puissance de sortie :	2 x 5 W / max. 10 W	



HUMANTECHNIK

S.M.S Audio Electronique S.à.r.l.

173, rue Général de Gaulle
68440 HABSHEIM, France
Tél. : 03 89 44 14 00
Fax : 03 89 44 62 13
E-mail : sms@audiofr.com
Internet : www.humantechnik.com

Votre audioprothésiste vous conseille volontiers !